

※ 必ずお読み下さい

インナーストレングスのお買い上げありがとうございます。

<インナーストレングステーブルの使用法>

★ご使用の際はラッチを外し半分ほど開けて下さい。テーブルの後ろ側に立ち、脚を押し開くかハンドルを使いながらテーブルを開くことで脚が自動的に開きます。テーブルを直立に起こして下さい。起こした後はテーブルの片方を持ち上げケーブルが真っ直ぐなるよう調整して下さい。

★各脚のグリップノブを手で回して外し、穴の開いた高さ調節の脚部をベッド本体から外して、お好みの高さに外脚を調節した上で再度グリップノブを締めてください。全てのグリップノブがしっかりと締められているか、高さが全て合っているかお確かめ下さい。

<インナーストレングステーブルのケアの方法>

★6ヶ月おきにネジやボルトを確認し、緩んでいる場合にはしっかりと締め直して下さい。

・高品質ワックスや光沢剤で木の部分をケアして下さい。風通しの良い場所で保管し、湿気の多いところはお避け下さい。

★生地を痛める恐れがあるため、寒いあるいは暑い場所にテーブルを放置しないで下さい。テーブルを車内に放置・保管することはご遠慮下さい。生地の質を守ったまま長期間ご使用になるためにも、保管および移動にはキャリーケースをご利用下さい。また、生地の劣化やキズを防ぐため、必ずシーツやパッドをご使用下さい。

★お掃除には洗剤をぬるま湯に溶かし柔らかい布に染み込ませたものを使用して下さい。汚れが残っている場合には、磨耗防止タイプのクリーナーを布に染み込ませてご使用ください。洗剤やクリーナーを使用してお掃除した後は、水拭きしてから柔らかい布で湿気を拭き取ってください。

<保証について>

インナーストレングステーブルは木部の保証は3年間となります。ヘッドレスト、フォーム、表面生地は1年となります。ベッド裏側に貼ってありますシールにベッドの個体を表すシリアル番号（Qから始まる）が記載されておりますので、そちらが保証書となりますので、お剥がしになりませんようお願いいたします。お客様の不注意、過失、事故、不適切な取り扱い等による不具合の場合には同保証は適用されませんのでご了承下さい。尚、同保証はご購入されたご本人所有の場合のみ適用されます。

* 当社は上記の内容を事前通知なしで変更する権利を有します

お客様各位

この度は弊社よりインナーストレングス社製マッサージベッドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

万全の注意を払い、出荷しておりますが、誤送・不良等ございましたら、お手数ですが本書到着から1週間以内に下記までご連絡ください。以後の対応はできかねますのでご了承ください。

また、事前連絡なき返品・交換はお受けできませんのでご注意下さい。

株式会社 ブロッサムトレーディング

〒110-0014 東京都台東区東上野6丁目23番5
第二雨宮ビル202

TEL: 03-6382-9662 FAX: 03-6382-9663

E-mail info@blossom-hana.com